

Empatica 初期設定方法

製品がお手元に届きましたら、以下の手順に沿って初期設定等をお願いいたします。

1. Care Lab Portal へのサインアップ

[Care Lab Portal](#) にサインアップします。

Care Lab Portal では、あなたの研究を管理することができます。

2. 参加者の認証情報の作成

[Care Lab Portal](#) から参加者のログイン認証情報を作成します。

参加者はこの認証情報を使用して Care Lab モバイルアプリにログインし、データ収集を開始することができます。

3. Care Lab App のダウンロード

Care Lab は [iOS](#) と [Android](#) に対応しています。

参加者のスマートフォンにアプリをダウンロードしてください。

その後、[Care Lab Portal](#) で作成した認証情報でログインし、EmbracePlus デバイスとペアリングします（アプリが各ステップを案内します）。

4. 収集したデータへのアクセス

EmbracePlus が記録した生データとデジタルバイオマーカーにアクセスするには、Empatica にアクセスする必要があります。

生データとデジタルバイオマーカーにアクセスするには、[Care Lab Portal](#) で生成されたセキュアアクセスキーを使用して、Empatica AWS Sw bucket にアクセスする必要があります。

Care Lab Portal には、[データへのアクセス方法のマニュアル](#)もごさいます。

5. トレーニング資料とユーザーガイド

[Care Lab Portal](#) には、追加のトレーニング資料とユーザーガイドがごさいます。

リンクが正しく表示されない場合は、以下の URL をご利用ください。

https://s3.amazonaws.com/box.empatica.com/ehmp/careportal/training_deck/v2.4e/en.pdf

お問い合わせ先：弊社技術サポート inter-support@creact.co.jp



株式会社 クレアクト

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階

Tel : 03-3442-5401 Fax : 03-3442-5402 eMail : info@creact.co.jp